

## Sådan bruges hjertestarteren

ZOLL AED Plus hjertestarteren er enkel at bruge, og guider førstehjælperen sikkert igennem hele forløbet.

### 1 Kontroller bevidsthed

Kontroller bevidsthed og vejrtrækning. Råb på hjælp og ring 112.



### 2 Start HLR

Hjerte-Lunge-Redning påbegyndes mens hjertestarteren hentes.




### 3 Tænd hjertestarteren

Følg hjertestarterens instruktioner.




### 4 Anbring elektrode

Fjern tøj og anbring elektroden som anvist

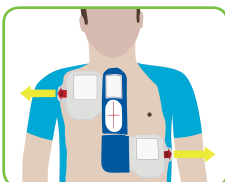


### 5 Stød

Hvis stød anbefales, tryk på den blinkende stød-knap. Rør ikke patienten.

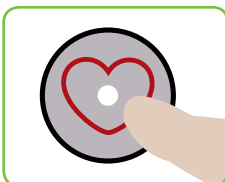

### 6 Følg instruktionen

Giv hjerte-lunge-redning. Forsæt indtil ambulancen ankommer.

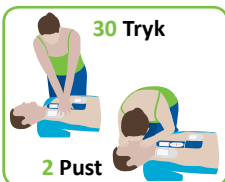

Hjertevagt er et brand under Medidyne ApS og specialiserer sig i salg af hjertestartere, tilbehør og førstehjælpskurser. Hjertevagt er Danmarks førende leverandør af hjertestartere og tilbyder løsninger, som gør det muligt at redde flere liv blandt de ca. 3.500 danskere, der hvert år rammes af pludseligt og uventet hjertestop.

Sammen med professionelle førstehjælpsinstruktører tilbyder Hjertevagt rådgivning, planlægning, implementering og opfølgning på hjertestartsprogrammer samt førstehjælpskurser.


Medidyne ApS er autoriseret distributør af ZOLL hjertestartere i Skandinavien.

Medidyne

Medidyne ApS  
Tel +45 35 25 12 48  
www.medidyne.dk  
www.hjertevagt.dk



Red liv med hjertestarter

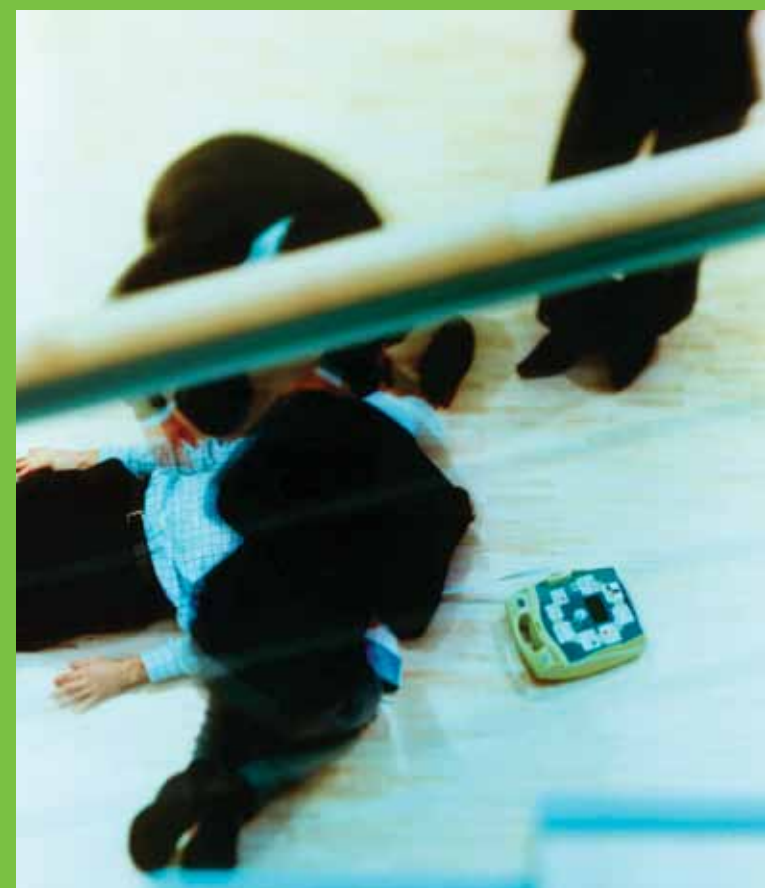

ZOLL ANBEFALES AF  
HJERTEFORENINGEN



## Gør en forskel og red liv

Hver anden time falder en dansker om med pludseligt hjertestop. Hurtig og rigtig førstehjælp indenfor få minutter er afgørende. Chancen for at overleve falder med 10% for hvert minut, der går uden førstehjælp. Hjerter-Lunge-Redning er vigtig førstehjælp, men den mest effektive behandling af hjertestop opnås, når god hjertemassage kombineres med brug af en hjertestarter.

I Danmark overlever kun ca. 10% et pludseligt hjertestop. Internationale undersøgelser viser, at hurtig indsats med hjertestarter kan øge overlevelsen til mere end 50%.

ZOLL AED Plus, er den eneste hjertestarter med indbygget REAL CPR Help®, som måler og registrerer hvordan du giver hjertemassage - og som giver dig feedback, der hjælper dig med at gøre det rigtigt. Meddelelser via lyd og billeder hjælper dig til at yde livreddende førstehjælp med selvtillid og overblik.

### Hjerteforeningen og Sundhedsstyrelsen

ZOLL AED Plus hjertestarter anbefales af Hjerteforeningen, og efterlever samtidig Sundhedsstyrelsens krav og specifikationer til en hjertestarter.

✓ Lasse Kreiner er en blandt mere end de 50 mennesker i Danmark, der er genoplivet med en ZOLL AED Plus hjertestarter.



## Det kan ske for enhver

Hjertestop rammer mennesker i alle aldersgrupper, men risikoen stiger med alderen. I omkring halvdelen af alle tilfælde slår hjertestoppet ned som lyn fra en klar himmel.

### Lasse blev genoplivet

Den 9. februar 2010 var en skelsættende dag for Lasse Kreiner. Lasse følte sig rigtig skidt tilpas og havde ondt i maven og skulderen. Lasse kontaktede sin læge, som bad ham om straks at komme ind til hans praksis.

I Gribskov lægecenters venteværelse faldt Lasse om med pludseligt hjertestop. Tililende personale gav Lasse førstehjælp og med hjælp af en ZOLL AED Plus hjertestarter, fik de hurtig gang i Lasses hjerte igen.

Se hele Lasses historie som video på [www.hjertevagt.dk](http://www.hjertevagt.dk)



**ZOLL**  
**AED PLUS**

### Feedback i forhold til hjertemassagen

ZOLLs patenterede elektroder måler hjertemassagens hastighed og dybde. En stemme i hjertestarteren fortæller dig, om du giver effektiv hjertemassage.

### Unikt grafisk og brugervenligt design

Lyd, tekst og grafiske illustrationer guider dig sikkert igennem den livreddende førstehjælp.

### En elektrode er nemmere end to

ZOLLs patenterede elektrode CPR-D•padz™ er to elektroder samlet i ét stykke, der hurtigt og nemt placeres på patienten.

### Mindre vedligehold og lave driftsomkostninger

Vedligehold er begrænset til nye elektroder og batterier hvert femte år. Dette gør det nemt og billigt at vedligeholde hjertestarteren.

### Automatisk selv-test og 7 års garanti

Automatisk selv-test sikrer dig, at hjertestarteren altid er klar til brug. Der er 7 års garanti på hjertestarteren.

ZOLL AED Plus er robust, brugervenlig og er en af de mest fortrukne hjertestartere på markedet.

Læs mere om ZOLL AED Plus på [www.hjertevagt.dk](http://www.hjertevagt.dk)